

Genflow

Kan/ Sıvı Isıtıcı

Kolay kullanım, az bakım gerektirir ve düşük çalıştırma maliyeti



Genflow Kan/ Sıvı Isıtıcı su banyosu olmadan elektronik kontrollü "kuru başlıklı" ısıtma sistemidir

Kolay kullanım ve taşıma için kompakt gövde ve doğru ağırlıkla tasarlanmıştır.

Kullanıldıktan sonra atılması gerekmez. Genflow şimdi olağan infüzyon ve transfüzyon set kullanımınızı kolaylaştıran tüp kullanır.
Model FIW-4150 dış çapı 4.2-5.0 mm tüpe uygundur
Model FIW 3040 dış çapı 3.0-4.0 mm tüpe uygundur

Genflow tüp ısısını her saniyede ölçer ve ekrana gösterir
Önerilen akım oranı 1~ 2 ml/dakikadır

- Çalıştırdıktan sonra 3 dakika içerisinde kullanıma hazır
- 39 0C tüp sıcaklığında emniyet alarmı
- 41°C tüp sıcaklığında ısıtıcı kapanır
- Montaj çubuğu- ısıtıcıyı IV ayağına asınız
- Hasta yatağına sabit düz gövde yerleştirilebilir.

MedLume
Scientific

Genflow

Kan/ Sıvı Isıtıcı

Hipotermiden kaçınmanın yolu olan hastanın ısısının yeniden dağıtımını minimize eder.

Genflow cerrahi müdahaleden sonra da konfor sağlar



Akıllı ısıtma teknolojisi güven içerisinde kan / sıvı ısıtmasına her zaman yardımcı olur. Tüp sıcaklıkları her saniyede devamlı olarak ölçülür

Ekstra maliyet gerektirmez. Tesisinizde olağan olarak kullanılan infüzyon/transfüzyon setleri veya uzatma tüpleri kullanılabilir

Kolay kurulum



Model	FIW-4150	FIW-3040
Tüp dış çapı	4.1- 5.0 mm dış çap	3.0-4.0 mm dış çap
Önerilen akış	60-720 ml/saat (1-12 ml/saat)*	
Isı plakası sıcaklığı	< 43 °C	
Güvenlik özellikleri	39 °C (tüp sıcaklığında) yüksek sıcaklık alarmı ve gösterge	
Güç gerekliliği	VT-1: 110V +/- % 10 50/60 Hz (60W) VT-2: 230V +/- % 10 50/60 Hz (60W)	
Ortam şartı	0-40 °C, % 30-90 nispi nem yoğuşmasız	
Sıçrama koruması	IP x 4	
Ebat ve ağırlık	185 (uzunluk) x 65 (genişlik) x 45 (derinlik) mm/ 506 gr.	

* Çıkış sıcaklığı ilk kan/ sıvı sıcaklığından etkilenir, tüp setinin oda sıcaklığı, akım oranı ve çapı kullanılır

CE 0120

EC REP

Obelis s.a. Bd Général Wahis 53 1030 Brüksel, Belçika

Üretici:
Hotech Instruments Corp.
7-1FL., No.8, Lane 609, Sec. 5,
Chung-Shin Rd. San-Chung Dist.,
New Taipei City, Tayvan Çin Halk
Cumhuriyeti

MedLume
Scientific

MedLume Scientific Co., Ltd.

13 Fl., No. 193, Jian-8th Rd., Chung-He Dist.
New Taipei City 23585, Tayvan Çin Halk
Cumhuriyeti
Tel : 886-2-8221-2622 Fax : 886-2-8221-3722
<http://www.medlume-scientific.com>